

オパールエッセンス の使用説明書（日本語）

この度は数ある店舗様から当店をお選び頂き、誠にありがとうございます。

オパールエッセンスの利用の前にこちらの使用説明書をご確認ください。

【下準備】

- ご使用前に、歯面を歯ブラシなどで綺麗に洗い、水で十分に濯いでください。
- 当商品の使用には、別途ご自身の歯形に合ったマウスピースが必要となります。マウスピースは、お近くの歯科医院か、ご自宅で作成できるキットでご用意ください。

STEP 1



シリンジ先端キャップを外し、マウスピースの前歯6本ほどに米粒大ほどのジェルを塗布してください。6本全部でシリンジの1/3から1/2ほど使用します。

STEP 2



強く押しすぎてジェルがはみ出さないように、マウスピースを両顎の歯にはめ込みます。※下記を参考に装着時間を調整ください。

STEP 3



マウスピースを取り外したら、歯ブラシで歯に残ったジェルを落として口を濯いでください。ジェルを飲み込まないようにご注意ください。

STEP 4



歯ブラシとぬるま湯を使い、マウスピースに残ったジェルを落としてください。

※装着時間の目安

オパールエッセンス 45%	約30分
オパールエッセンス 35%	約30分
オパールエッセンス 20%	約2～4時間
オパールエッセンス 15%	約4～6時間
オパールエッセンス 10%	約8～10時間（一晚）

ご使用にあたっての注意事項

ご使用中

- オパールエッセンスのご使用時に知覚過敏による痛みが発生した場合は、一度マウスピースを外し痛みが引いてからもう一度装着してください。
- 上記の方法でも痛みが引かない場合は、装着時間を減らすかパーセンテージ%の低い商品をご使用ください。
- 可能な限りオパールエッセンスのジェルを飲み込まないようにご注意ください。
- 原因不明な痛みや異常が発生した場合はすぐに使用を止め、お近くの歯科医にご相談ください。

ご使用後

- オパールエッセンスのご使用後は歯面が通常時よりも粗造な状態となっております。歯を磨く際は研磨剤などの入っていない歯磨き粉をご利用ください。
- オパールエッセンス ご使用後24時間は酸性のものを飲食しないようご注意ください。
(例) オレンジジュース、ヨーグルト、お酒、炭酸飲料、柑橘系の果物など...
- オパールエッセンス ご使用後48時間は着色しやすい物を飲食しないようご注意ください。
(例) コーヒー、タバコ、カレー、紅茶など...

保管方法

- 先端のキャップを外したシリンジは、先端でジェルと空気が触れないようにラップなどで密閉し、冷蔵庫にて保管してください。
- 一度開封したシリンジは、できるだけ早くご使用ください。

※当書面にある使用説明書は、英語でのオリジナル説明書を当店にて日本語に翻訳、修正したものと
なっております。より詳細な説明書をご希望な場合は、オリジナル（英語）の使用説明書はUltradent社
のホームページからご確認いただけます。

画像参照元 : <https://www.opalescence.com>

Copyright@ penguin-foot Buyma